
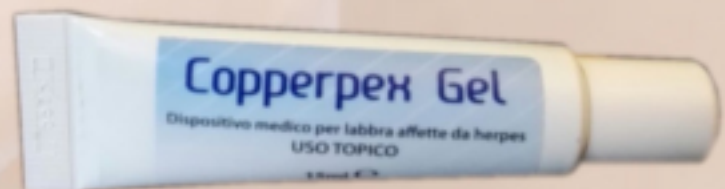


# COPPERPEX

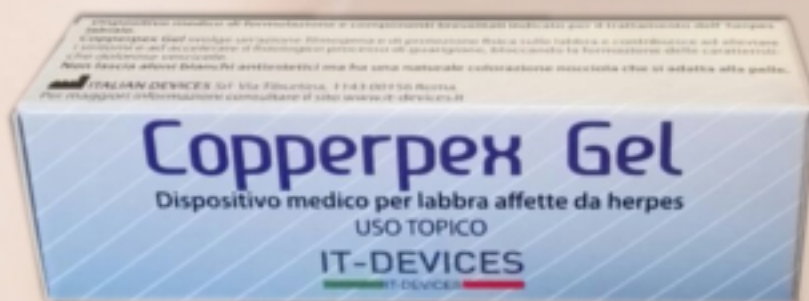

**ITALIAN DEVICES**  
IT-DEVICES

## COPPERPEX GEL

### USO TOPICO

## Dispositivo medico per labbra affette da herpes

## Dispositivo medico di formulazione brevettata

**COPPERPEX GEL** svolge un'azione filmogena e di protezione fisica sulle labbra e contribuisce ad alleviare i sintomi e ad accelerare il fisiologico processo di guarigione, bloccando la formazione delle caratteristiche dolorose vescicole.

### **Che cos'è Herpes Labialis**

L'herpes simplex labialis viene annoverato fra le malattie cutanee più frequenti e colpisce circa il 95% della popolazione. Le prime manifestazioni dell'herpes labiale sono il formicolio, il bruciore, il prurito, una sensazione di tensione e anche dolore. Poco tempo dopo, compaiono piccole vesciche piene di liquido, che si rompono dopo alcune ore o alcuni giorni, e che, seccandosi, formano delle crosticine che tendono a guarire da sole. L'intero decorso dell'herpes dura, in genere, dai 10 ai 14 giorni.

Oltre a un abbassamento delle difese immunitarie, altri fattori di rischio sono:

- esposizione prolungata ai raggi solari;
- malattie febbrili;
- ciclo mestruale, gravidanza (alterazioni ormonali);
- stress fisico o mentale;
- traumi locali etc.

Il rischio di trasmissione del virus dell'herpes simplex ad altre parti del corpo, come naso e occhi, è particolarmente elevato quando il liquido fuoriesce dalle vesciche in seguito alla loro rottura.

### **Cos'è COPPERPEX GEL:**

**COPPERPEX GEL** rappresenta l'approccio naturale ed efficace nei confronti di questa problematica.

**COPPERPEX GEL** è un prodotto innovativo, studiato per il trattamento efficace delle manifestazioni acute e ricorrenti dell'herpes labiale.

### **COPPERPEX GEL contiene:**

Il dispositivo è stato studiato con una formulazione innovativa in grado di formare un'efficace film protettivo e accelerare il fisiologico processo di guarigione.

Questo mix esclusivo (Magaldrato, Rame, Aloe Ferox, Tea tree oil, olio essenziale di menta) su una base di di sodio ialuronato lo rende assolutamente sicuro e facile d'usare.

Le sostanze funzionali presenti in **COPPERPEX GEL**, sono: Il Magaldrato, un agente insolubile in grado di alzare il pH e rendere sfavorevole l'ambiente alla replicazione del virus; il gel d'Aloe e l'olio essenziale di Melaleuca, che con la loro azione, agiscono in sinergia con il rame gluconato proteggendo la parte interessata e difendendola da fattori ossidanti e irritativi svolgendo, inoltre, un'azione antivirale per inattivare il virus ed inibirne la replicazione sin dai primissimi istanti. Mediante l'azione filmogena protettiva del sodio ialuronato si riesce ad isolare le labbra dall'ambiente esterno. Infine, l'olio essenziale di menta lo rende piacevole e fresco all'applicazione.

### **Perché si usa COPPERPEX GEL:**

**COPPERPEX GEL** è indicato per il trattamento dell'herpes labiale. Il prodotto riduce i sintomi iniziali quali dolore, bruciore, prurito, sensazione di calore, gonfiore e tensione cutanea. Limita la comparsa di vescicole e croste. Applicato ai primi sintomi, interrompe il progredire della sintomatologia alle fasi successive.

Con l'applicazione di **COPPERPEX GEL** la zona infetta inizierà ad asciugarsi e quindi guarirà rapidamente, accelerando i tempi di guarigione.

### **L'EFFETTO È IMMEDIATO: L'AZIONE È APPREZZABILE GIÀ DOPO POCHI MINUTI DALLA PRIMA APPLICAZIONE**

**COPPERPEX GEL** oltre ad essere molto efficace:

- è sicuro e facile d'usare;
- ha effetto immediato;
- impedisce lo svilupparsi di herpes labiale utilizzando l'effetto naturale dei suoi componenti;
- impedisce la formazione delle lesioni (vesciche labiali);
- riduce il prurito, il bruciore e la tensione della pelle;
- è privo di sostanze chimiche

**Non lascia aloni bianchi antiestetici ma ha una naturale colorazione nocciola che si adatta alla pelle.**

L'uso tempestivo di **COPPERPEX GEL** impedisce in modo sicuro la formazione delle vesciche labiali senza effetti collaterali indesiderati o alterazioni cutanee nella zona delle labbra.

### **Composizione di COPPERPEX GEL:**

Paraffinum Liquidum, Aqua, Aloe Ferox extract, Magaldrate, Acacia Senegal, Copper Gluconate, Sodium hyaluronate, Melaleuca alternifolia Oil, Mentha Piperita herb oil.

## **Istruzioni per l'uso di *COPPERPEX GEL* :**

Applicare 3/4 volte al giorno, e comunque tutte le volte che compare il dolore: utilizzata già dai primissimi segnali aiuta a contrastare la formazione delle vescicole erpetiche.

Distribuire il prodotto aiutandosi con i polpastrelli, avendo cura di lavarsi bene le mani prima e dopo ogni applicazione.

**Per mantenere in salute le tue labbra puoi utilizzare anche gli altri Dispositivi Medici della linea *COPPERPEX*: *COPPERPEX STICK* e *COPPERPEX SUN*, per una preventiva protezione quotidiana.**

## **Effetti indesiderati**

Non sono noti ad oggi effetti indesiderati causati dall'uso del prodotto.

## **Avvertenze e precauzioni di utilizzo**

È importante che *COPPERPEX GEL* venga utilizzato sempre dalla stessa persona. In caso contrario, è possibile che si verifichi la trasmissione indesiderata del virus dell'herpes.

Non applicare intorno agli occhi.

Non esistono controindicazioni all'uso salvo eventuali e rari casi d'ipersensibilità individuale a uno dei componenti.

## **Particolari precauzioni durante la gravidanza e l'allattamento**

Per l'uso durante la gravidanza è sempre opportuno chiedere consiglio al proprio medico.

## **Eventuale tossicità dichiarata**

Non sono stati riportati casi di tossicità dichiarata.

## **Manutenzione, conservazione e manipolazione del dispositivo**

Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

## **Modalità di trasporto e smaltimento**

Il prodotto non utilizzato ed i rifiuti da esso derivati devono essere smaltiti in conformità ai requisiti di legge locali.

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE

## **Contenuto della Confezione**

Confezione: *COPPERPEX GEL*:

Tube da 15 ml di gel in astuccio di cartone ed istruzioni